
Sorbact® - opatrunki na rany trudnogojące się

Opakowania opatrunków Sorbact®:

Jałowe, pakowane pojedynczo do jednorazowego użytku:

Sorbact® opatrunek adsorpcyjny



Wymiary:
7 cm x 9 cm,
10 cm x 10 cm,
10 cm x 20 cm

Sorbact® kompres



Wymiary:
4 cm x 6 cm,
7 cm x 9 cm

Sorbact® taśma z gazy



Wymiary:
2 cm x 50 cm,
5 cm x 200 cm

Jałowe, pakowane po 5 sztuk do jednorazowego użytku:

Sorbact® okrągły gazik o średnicy Ø 30 mm




Kiedy nie należy stosować opatrunków Sorbact®?

Opatrunku Sorbact® nie należy używać razem z tłustymi maściami stosowanymi na rany lub na miejsca zakażone grzybami, ponieważ takie skojarzone leczenie może być mniej skuteczne.

O czym należy pamiętać stosując opatrunki Sorbact®?

Opatrunek należy zawsze nakładać zieloną, hydrofobową powierzchnią bezpośrednio na ranę lub na miejsce zakażone grzybami. Jest ważne, aby Sorbact® przylegał do rany lub miejsca zakażonego grzybami, aby zapewnić wiązanie się bakterii i grzybów z opatrunkiem.

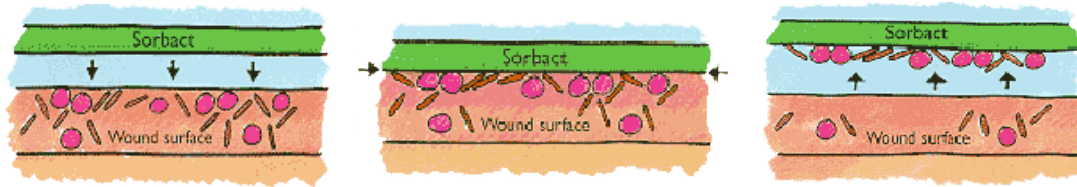

Sorbact® jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

W celu uzyskania najlepszego efektu leczniczego, ważne jest, aby stosować się do instrukcji użycia opatrunku zamieszczonej poniżej.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane lub ryzyko cytotoksyczności nie są znane. Nie wykazano ryzyka rozwoju oporności bakterii lub grzybów ze względu na fizyczny mechanizm działania Sorbact®.
